



FILTRIERENDE HALBMASKE EGE 700 FFP3 NR

erfüllt die Anforderungen der neuen erweiterten europäischen Norm
EN 149:2001 + A1:2009

BEDIENUNGSANLEITUNG

Gebrauchsanleitung:

- Passen Sie die ausgewählte Maske wie in den folgenden Zeichnungen gezeigt an Ihr Gesicht an. (Abb. 1,2,3 und 4)
- Vor dem Betreten des Bereiches, in dem Sie die Maske verwenden werden, überprüfen Sie die Maske. Atmen Sie wie in Abb. 3 gezeigt ein und aus, um zu überprüfen, ob Leckagen auftreten. Falls Leckagen auftreten sollten, fangen Sie wieder bei Abb. 1 an.

Benutzung der Atemschutzmaske EGE 700 FFP3 NR



Pflege/Warnhinweise:

- Ändern und reparieren Sie keine Teile an der Maske.
- Wenn Schäden auftreten, entfernen Sie die Maske und verwenden Sie eine neue.
- Nicht verwenden, wenn die Lebensdauer der Maske abgelaufen ist.
- Schützen Sie die Maske vor Staub und Schmutz bei Nichtgebrauch.
- Die Arbeitsumgebung sollte mindestens 19,5% Sauerstoff enthalten, andernfalls darf die Maske nicht genutzt werden.
- Verwenden Sie keine Maske an ungelüfteten Orten, in engen Brunnen oder an Orten mit schädlicher Umgebung.
- Die Masken schützen nicht vor giftigen Gasen und Dämpfen.
- Verlassen Sie sofort den Bereich und entfernen Sie die Atemschutzmaske, wenn die Atmung schwierig wird, Sie Reizungen spüren, riechen oder schmecken, Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.
- Wenn der Atemwiderstand steigt, sofort eine neue Maske verwenden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Die Masken sind nur für den Einmalgebrauch konzipiert.

Lagerung:

- Die Luftfeuchtigkeit darf nicht höher als 80 % liegen.
- Die Temperatur darf zwischen -20 °C und +40 °C liegen.

CE certification according to European Council Directive 89/686/EEC and subsequent amendments.
Certified by: UNIVERSAL Belgelendirme Mesleki Yeterlilik San. Tic. A.S., Yukari Dudullu Mah. Tavukçuyolu Caddesi
Demirtürk Sokak No:5 Ümraniye / İSTANBUL / Türkei

+90 216 540 27 90 +90 216 540 10 01 / bilgi@universalbelgelendirme.com

Download EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG:
egemaske.com | infimedix.de

Hersteller:

Körfez İş Güvenliği Ekip.San.ve Tic Ltd. Şti. / Şeyhli Mh. Başkomutan Cad. No: 2/1
34906 Pendik / İSTANBUL www.egemaske.com Tel. +90 216/5960610

Importeur/Vertrieb durch:

INFIMEDIX . INH. YASIN KARABACAK In den Geeren 7 . D-37520
OSTERODE/HARZ

www.infimedix.de / Tel. +49 5522/4060922